

ハイラックをご使用の医療従事者の方に

ハイラック専用 フェイスシールド ハイシールド

微粒子の飛沫や液体の飛沫などが
目又は顔にかかるのを防ぎます

PPE装着時の負担を少しでもラクに

ハイシールドの特長

① くもりにくい

シールドとマスクの間に空間を設けています


② 取付けかんたん

ハイラックに直接取付けて固定します

③ 軽量 約16g

装着時の負担を軽減します

ヘッドバンド等による圧迫感ありません

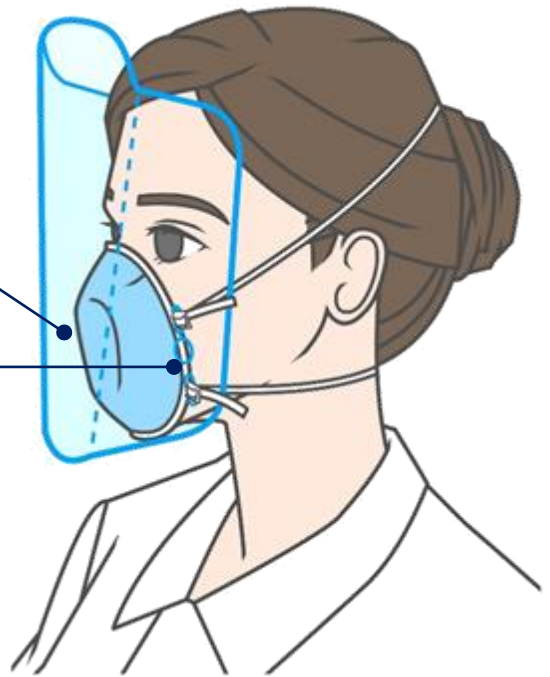

つけたか・はずしかたは裏面へ ➡

【仕様】

- ・材質：ポリエチレンテレフタレート
- ・サイズ：約 横 300mm×縦 240mm
- ・質量：約16g
- ・枚数：1箱50枚入り
- ・製造国：日本

【使用条件】

- ※ 本品は、使い捨て製品です。
- ※ 本品は、ハイラックシリーズ製品の専用フェイスシールドです。ハイラックNeoシリーズに取り付けることはできません。




興研株式会社

ハイラック専用フェイスシールド ハイシールド 【つけかた・はずしかた】


つけかた

① シールドを折る

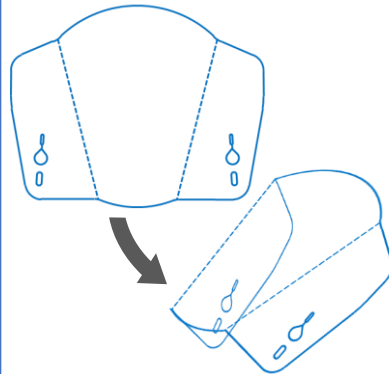


シールドの両サイドの
折り目を軽く折ります。

② 上側を固定します

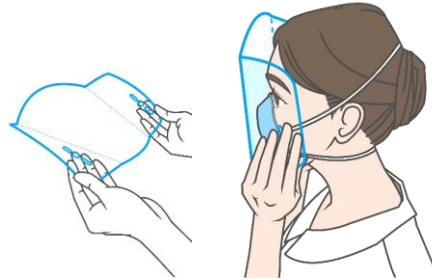

左右の丸穴に両手の中指を
あて、ハイラック上側のひも
通し(左右)にはめ込みます。

固定前

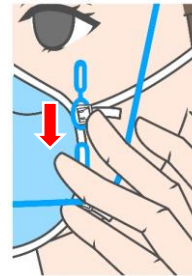


指でひも通しを押さ
えたまま、シールドを
下にスライドします。

固定後



上側のひも通しに、
ひも通し穴(上)を
固定します。

③ 下側を固定します

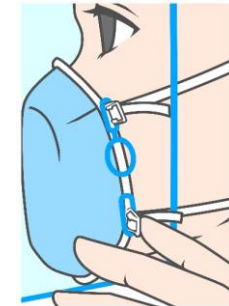

下側のひも通しに、ひも
通し穴(下)をはめ込んで
固定します。


はずしかた



両サイドの端を前側に
反転させてはずします。
シールドの前面に手が
触れないように注意し
て廃棄してください。


ハイラック及びハイシールド 各部の名称

ハイラック

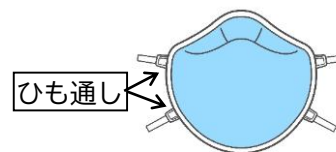

ひも通し

ハイシールド

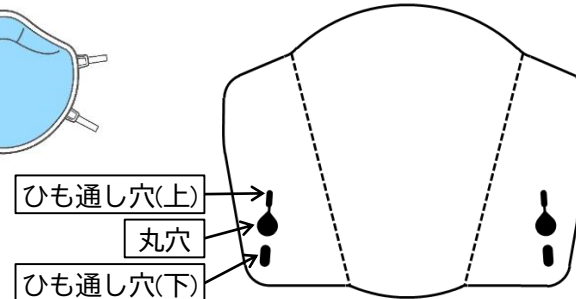

ひも通し穴(上)

丸穴

ひも通し穴(下)

