


- 请在干净的环境中佩戴 N95 口罩。
- 本指南示范的是 Hi-luck350 的佩戴方法。关于产品的使用，请务必仔细阅读产品附带的使用说明书。

SAKAI 式 Hi-luck350 的佩戴方法

①

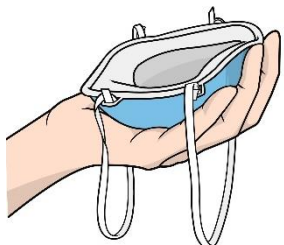


将 2 根绑带绕过后背，用手指搭住口罩内侧与脸部接触部分的凹陷部分。


②



将凹陷部分抵住鼻根，将口罩盖在脸上。

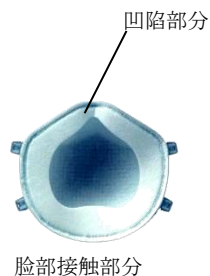

③

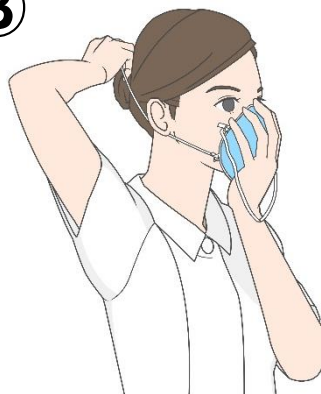

将下方的绑带挂到脖子后面。

④




将上方的绑带挂到头部上方。

⑤



上下左右移动，使口罩与脸部紧密贴合。绑带长度不合适时，请根据“绑带的调节”的说明进行调整。佩戴完成后，请进行用户密封检查。

●用户密封检查（阳压法）

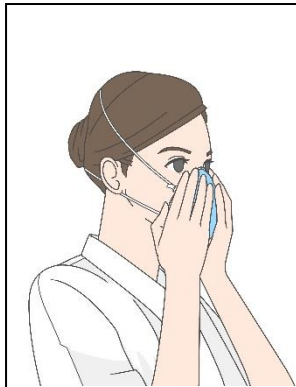

须检查是否有空气从口罩与脸部之间泄漏，确认口罩的佩戴是否正确。
(每次佩戴时进行检查)

用手覆盖滤网表面进行吐气，如果口罩与脸部之间没有空气泄漏，则表示密封性良好。

如果感觉到有空气泄漏，请重新调整口罩的位置，或者调节绑带。


●绑带的调节

系紧时



请在佩戴着口罩的状态下，拉动绑带前端。

松开时

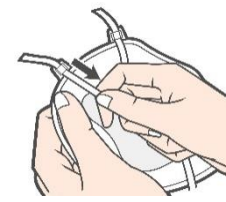

摘下口罩，如图所示，拉动绑带。

- 请在干净的环境中脱卸 N95 口罩。
- 本指南示范的是 Hi-luck350 的脱卸方法。关于产品的使用，请务必仔细阅读产品附带的使用说明书。

SAKAI 式 Hi-luck350 的脱卸方法

脱卸下方的绑带

①



将手指搭在挂在脖子后面的下方绑带上，将绑带向上拉。

②



把拉起的绑带拉到头部上方，脱卸掉下方的绑带。



警告

●脱卸时请勿触摸口罩的表面。

如果口罩表面吸附了病毒、细菌等，可能造成二次感染。


脱卸上方的绑带 / 废弃时勿接触表面

③



将手指搭在挂在头部上方的绑带上，将绑带向上拉。

④

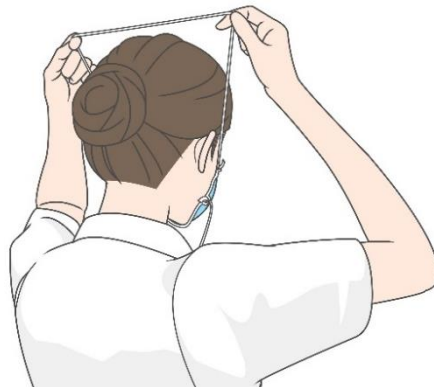

把拉起的上方绑带往前拉并脱卸掉。

⑤



从脸上取下口罩后，请勿接触滤网表面，请直接废弃口罩。