

感染対策用保護メガネ KE-01 EYECARE GLASS Premium for Hi-Luck

日本産業規格 JIS T8147(2016)

米国製品安全規格 ANSI Z87.1

欧州製品安全規格 EN 166

PPE（個人用保護具）のなかで、マスクとの相性の良さををもっとも求められる保護メガネ。KE-01はハイラックとの相性が良く、液体飛沫・飛来物から眼を守る高品質の感染対策用の保護メガネです。



ハイラックとの相性がいい保護メガネ



POINT

- 軽量で掛け心地に優れる
- オーバーグラス対応（度付きメガネの上から着用可能）
- 洗浄・消毒可能

フィット性能と曇り止め効果に自信あり

欧米人と日本人では骨格に大きな違いがあります。日本人の骨格に合う設計をもとに、頭部および顔とフレームの隙間がでにくい、密着度を高めた構造となっています。弾力性に優れたテンプル（つる）が頭を優しく包み込み、フレームがずれることなくしっかりと

フィットします。重量も35gと軽く長時間快適にご使用いただけます。

保護メガネを使用する時に一番避けたいことは、曇って手元の視界が悪くなることです。KE-01はレンズ両面に曇り止めコートREMIUM Zero-fogコート付のアイケアグラスを採用しています。よって、入浴介助などの作業でも曇ることがほとんどありません。



弾力性に優れたテンプル（つる）。テンプルは自在に曲げられるため一人一人に合わせて調整可能。ハイラックと同じフリーサイズ



眼鏡の上から着用可能。レンズには縁がなくワイドな視界。視野の歪みがほとんどないため長時間着用でも疲れない高品質なレンズを採用



マイクロファイバーポーチ付き

■ 曇り止めコート、耐傷性等の性能試験

試験条件			KE-01
耐水性	【水洗い試験】20秒間、流水中擦り洗いをした。（これを1回と数えた）		○ 50回以上繰り返し擦っても曇らない
		【50℃水蒸気試験】約50℃の水蒸気を5秒間繰り返しあてた。（10回に1回柔らかい布で拭きとった）	○ 10分以上あてても曇らない
耐アルコール性	【浸透試験】24時間薬品に浸して密封後、呼吸を当て曇りの有無を確認した。	エタノール	○
		イソプロパノール70%	○
		イソプロピルアルコール98%	○
	【耐拭き性試験】コットン、プロワイプに各薬品を染み込ませ擦った後、呼吸を当て曇りの有無を確認した。	エタノール	○100回でも曇らない
		イソプロパノール70%	○100回でも曇らない
		イソプロピルアルコール98%	○100回でも曇らない
耐薬品性	【浸透試験】24時間薬品に浸して密封後、呼吸を当て曇りの有無を確認した。	塩酸10%	○
		硫酸10%	○
		アンモニア水10%	○
		メタノール	○
クォーク	121℃、30分の条件でオートクレープ後、呼吸を当て曇りの有無を確認した。		○ 30回でも曇らない
耐傷性	【表面摩擦抵抗試験】表面摩擦について、日本工業規格（JIS T8147:2016）に定められた方法に基づき試験を行った。基準値は8%以下となっている。		1.92% （従来品の2倍以上）

アルコール拭き取り消毒でも曇り止め効果が長く持続。洗浄にも強く、オートクレープも可能

感染対策用高性能マスク サカキ式 1180MD型

取替え式防じんマスクRL2
国家検定合格第TM538号

取替え式防じんマスクを長年開発、製造販売している当社であるからこそ、安心してお使いいただけます。



清潔感があり医療現場になじむ外観。患者さんが目にして不安を感じさせない



POINT

- N95マスクと同等のフィルタ捕集性能を有する
- フィルタを適宜交換し、マスク本体は繰り返し使用可能
- 洗浄・消毒可能（マスク本体）

N95マスクと同等のフィルタ捕集性能 コストパフォーマンスに優れる フィルタ取替え式マスク

パンデミックのような有事の際には、N95マスクの供給問題が起こりえます。新型コロナウイルス感染症がやり始めた際には、使い捨て式のN95マスクがやむを得ず繰り返して使用される事態となりました。

ここで紹介するマスクは、本体としめひもの洗浄・消毒ができます。交換部品はフィルタ以外に、しめひも、吸気弁、排気弁もご用意していますので、衛生的な手入れをすることで長くご使用できます。

フィット重視！

装着後に簡単にフィットチェックできる

マスクに内蔵したフィットチェッカーのつまみを引き上げるだけで、陰圧法で簡単にシールチェック（フィットチェック）ができます。



患者さんからみて医療従事者の表情がうかがえる透明な面体を採用。面体はやわらかく肌にやさしいシリコンゴムを使用。肌に対して低刺激性でフィット性などに優れる



マスクをしたままレバー（つまみ）を引き上げて密着性を確認できる



マスク専用ポーチ付き。マスクを衛生的に保管、携帯できる

性能

	社内基準値	1180MD
粒子捕集効率（DOP粒子）	95.0%以上	98.0%
吸気抵抗	80Pa以下	72Pa
排気抵抗	45Pa以下	25Pa
吸気抵抗上昇値	—	123Pa
二酸化炭素濃度上昇値／死積	0.5%以下/200cm以下	0.36%／144cm
質 量	114g以下	99g

上記の数値は、標準品（M面体、しめひもタイプRB）を使用して、オプション品等を取り付けていないときの性能です。

ハイラック専用サイトにて、KE-01と1180MDの専用のカタログをご用意しています。1180MDの装着ガイドを含め弊社代理店にご用命ください。

感染対策 ハイラック

検索



ハイラック専用サイト/感染対策製品ページ▶