

個人用防護具PPEセット フィットクルー W6N95型

感染症患者受入対応に


新興・再興感染症への備えに

ハイラックをご愛用いただいている施設、ならびに感染症対策として各種PPEの備蓄を検討されている施設や企業の方に、個人防護具（以下PPE）をセットにして製品化いたしました。

セット内容と特長

PPEセット「フィットクルー W6N95型」にはN95マスクハイラック350型をはじめ、ハイラックとマッチする保護メガネなど6種のPPEがセットになっています(図)。

—セット内容—

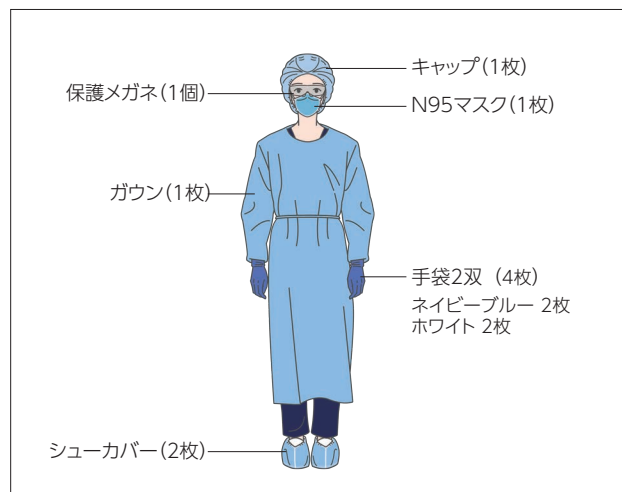

—特長—

N95マスク…フィット性能の高い『ハイラック350型』

保護メガネ (オーバークラス) KE-01…

ハイラックとマッチし、視力矯正用のめがねの上からも装着できる

ガウン…ニット袖で手首の露出を防ぐ

手袋…2双入り (二重手袋対応または予備)



PPEセット「フィットクルー W6N95型」

また、本セットには、PPEを初めて使う方や久しぶりに使用する人でも装着しやすいように装着ガイドが添付され、それが動画でも閲覧できます。

- ・普段使わない人でも「**装着ガイド**」で正しく装着ができる
- ・感染対策研修で「**動画**」を用いながら装着訓練ができる

セット品の保護メガネについて

本セットでは、N95マスクのハイラック350との相性がよい保護メガネ（アイケアグラス）KE-01を選定しています。KE-01は洗浄・消毒可能で、オートクレーブ滅菌もできますので再使用が可能です。

欧米人と日本人では骨格に大きな違いがあります。KE-01は日本人の骨格に合う設計をもとに、頭部および顔とフレームの隙間ができにくい、密着度を高めた構造となっています。重量も35gと軽く、弾力性に優れたテンプル（つる）が頭を優しく包み込み、フレームがずれることなくしっかりとフィットしたまま、長時間快適にご使用いただけます。

保護メガネを使用する時に一番避けたいことは、曇って手元の視界が悪くなることです。KE-01はレンズ両面に曇り止めコートを採用しています。よって、寒暖の激しい場所での作業でも曇ることがほとんどありません。



保護メガネKE-01



弾力性に優れたテンプル（つる）でサイズを自由に調整できる

PPE装着訓練用に活用いただけるフィットクルーの「装着ガイド」「動画」のご案内


本セットの取扱説明書には装着ガイド「つけたか・はずしかた」を掲載しています。

また、製品に掲載のQRコードから動画でも装着ガイドがご覧いただけますので、地域連携の感染対策研修や院内新人教育実習などで広く活用いただけます。

装着ガイド




装着動画

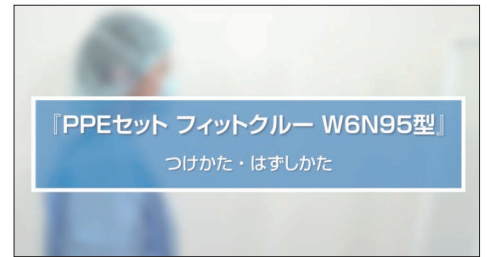

装着動画

フィットクルーを用いた感染症対策研修（院内、地域連携実務等）イメージ

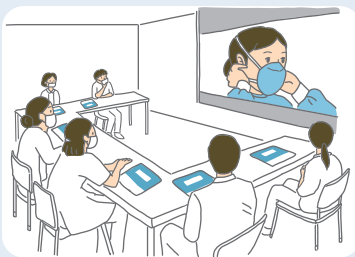

動画視聴



装着手本指導



参加者実務訓練

セット品の構成・詳細 (WHO PPE規格基準 適合)

	サイズ	材質	規格
N95マスク ハイラック 350型	フリー	【フィルタ部】ポリプロピレン、ポリエステル 【接顔部】ポリエチレン、レーヨン 【紐通し】ポリプロピレン、ポリアセタール 【しめひも】ウレタン、ポリエチレンテレフタレート	米国NIOSH*1 (N95) 合格 国家検定規格 (DS2) 合格
保護メガネ KE-01 Premium for HI-Luck	フリー	【フレーム、レンズ】ポリカーボネート	日本産業規格JIS T8147 (2016) 適合 米国製品安全規格 ANSI Z87.1 適合 欧州製品安全規格 CE EN166 適合
ガウン	フリー	ポリプロピレン、ポリエチレン	米国AAMI*2 液体防油性性能基準 レベル2 適合
手袋	Mサイズ	ニトリルゴム	—
キャップ	フリー	ポリプロピレン、天然ゴム	—
シューカバー	フリー	ポリプロピレン、天然ゴム	—

*1 NIOSH : National Institute for Occupational Safety & Health (米国労働安全衛生研究所)

*2 AAMI : Association for the Advancement of Medical Instrumentation (米国医療機器振興協会)

\\ 在庫管理もラクラク /
保管・備蓄に

- 箱に保存期限の年月を表示 : 5年
- 販売単位 : 1箱10セット入



- ハイラック専用サイトにて、PPEセット「フィットクルー」専用のカタログをご用意しています。
- 製品およびフィットクルーの装着ガイドのご要望は弊社代理店にご用命ください。



ハイラック専用サイト