


取扱ガイド

- ハイラックうつさんぞの装脱着は、清潔な場所で行ってください。
- 本ガイドは装着のしかたを示したガイドです。

ハイラックうつさんぞは、感染症に罹患された方が着けるマスクです。

ハイラックうつさんぞ 装着のしかた

①

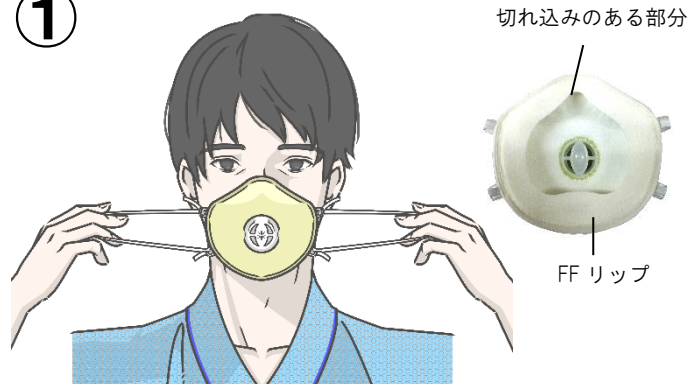

しめひもとフックを持ち、マスク内側のFF リップの切れ込みのある部分を鼻根に当てるようにつけます。

②



左右のしめひもを頭の後ろに引き、両耳がしめひもの輪の中に入るようにして、フックを引っかけてとめます。

③



上下左右に動かして、顔によくなじませてフィットさせてください。
しめひもの長さが合わない場合は、「しめひもの調節」にしたがって長さを調節してください。
装着が完了したら「シールチェック」をしてください。

●しめひもの調節

締める場合



マスクを装着したまま、しめひもの先端を引っ張ってください。
(左右上下の4か所調節可能)

緩める場合



マスクをはずして、図のように引っ張ってください。

※しめひもの先端が抜けないように注意してください。しめひもがはずれてしまうと元にもどすことはできません。

●シールチェック（陽圧法）



マスクと顔の間から空気の漏れがないかを調べ、正しく装着できているかを確認するために行います。
(装着の都度行ってください)

フィルター表面を手で覆って息を吐き、マスクと顔の間から空気の漏れが無ければ密着は良好です。

空気の漏れが感じられればマスクの位置を直すか、しめひもの調節を行ってください。

●マスクのはずしかた・廃棄について

- ・マスクのはずしかた
フックをはずしてしめひもを持ち、マスクに触らないように顔からはずします。
- ・マスクの廃棄について
施設職員の方の指示に従って廃棄してください。